



RESUCITADOR PORTATIL

AED 200A



Ventajas

- INDICADOR AUDITIVO CON DIFERENTES IDIOMAS INCLUIDO ESPAÑOL
- 5 NIVELES DE SONIDO SELECCIONABLE
- MODO ADULTO/INFANTIL
- MOCHILA DE TRANSPORTE COMPATIBLE CON EL AED
- USO FÁCIL PARA EL PERSONALO DE SALUD



7950 NW 53rd Street, Suite 337 Miami, Florida 33166, USA

Phone: 305440-5155 Fax: 8664809591

Email: ventas@welchmedical.com Web: www.welchmedical.com

AED 200A

FÁCIL DE USAR

Iniciando el equipo

Encienda la unidad.
Las instrucciones por voz empiezan inmediatamente como para utilizar el AED



Coloque los electrodos al paciente

Después de colocar los parches, el AED empezará inmediatamente analizando el ritmo ECG.
Este dispositivo a la siguiente etapa solamente cuando los parches hayan sido colocados correctamente.



Seleccione la energía

El modelo de resucitador AED 200A puede reducir la energía de resucitación a 30/70J seleccionando el rango de energía.



Realice la descarga

Si el sistema detecta la necesidad de shock presione el botón de descarga para entregar la energía correspondiente.

AED 200A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Autocomprobación: Diaria, Semanal, Mensual
2. Modo: Adulto, Niño
3. Forma de onda: Exponencial truncada bifásica
4. Energía: 200 Julios máx.
5. Secuencia de energía (Niño): 50/50/75 Julios
6. Secuencia de energía (Adulto): 150/150/200 Julios
7. Tiempo de carga (a 150J): Menos de 6 segundos
8. Tiempo de carga (a 200J): Menos de 8 segundos
9. Instrucciones de voz: Mensajes de voz extensos
10. Indicadores visuales: Indicadores LED
11. Control: Dos botones: ON/OFF, Shock
12. Almacenamiento ECG: 1,500 eventos
13. Tipo de batería: 12V, 2800mAh Li-MnO₂ (no recargable)
14. Dimensiones: 80mm (P) x 240mm (A) x 300mm (L)
15. Peso: 1.9 Kg (4.2 Libras)
16. Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
17. Humedad de funcionamiento: 30% a 95% (sin condensación)

AED 200A

ACCESORIOS



1. Un set de electrodos AED adulto desechables
2. Bolso de transporte
3. Kit de primeros auxilios compuesto por: cinta adhesiva, gasa, rasuradora, silbato, pinza de abs, tijera, manta térmica, 2 sobres de yodo, 2 sobres de alcohol, 2 sobres de gasa esterilizada.